

フィルムからデジタルへ

今お使いの撮影環境で簡単デジタル化。
よりシンプルで快適な診療をお届けします。




GC Scan 7400

デジタルX線イメージングプレートスキャナー

今までのフィルムの取り扱い方法と同感覚で、簡単にデジタル化。 ジーシーのデジタルX線イメージングプレートスキャナー。

「G スキャン 7400」は、従来お使いの撮影環境はそのままに、フィルム取り扱い手順と変わらずにデジタル化できるイメージングプレートスキャナーです。シンプルな操作性とコンパクトサイズで、デジタルX線撮影をサポート。高画質と使いやすさを実現した「G スキャン 7400」でデジタル化をはじめてみませんか。

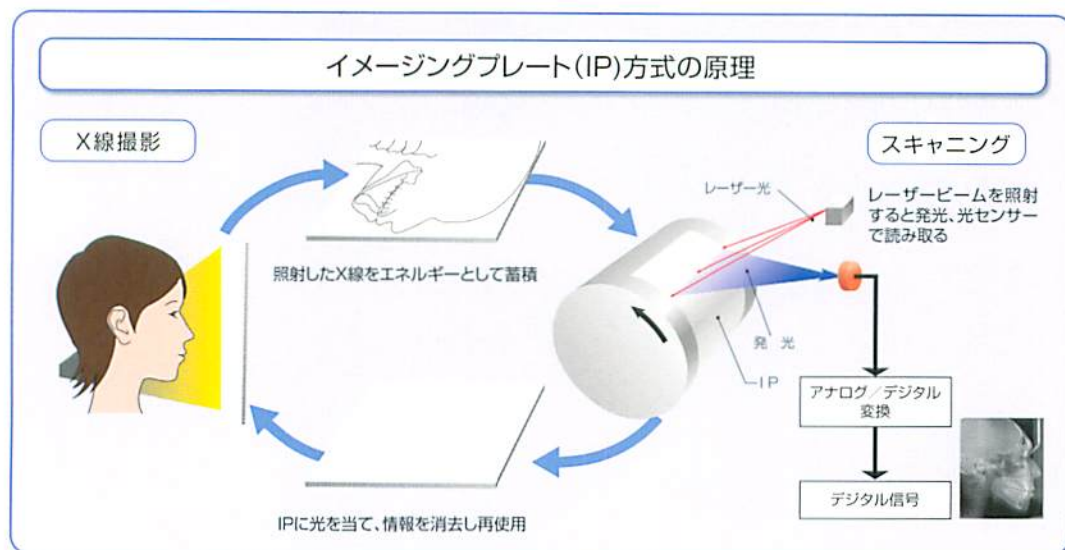

今までと変わらない環境で 簡単にデジタル化!

既存の撮影環境のままでデジタル化を実現
撮影手順もフィルムと変わらないから
ストレスフリー

操作はフィルム撮影とほとんど変わりません。従来のフィルムを取り扱う感覚で一連の作業が行えます。フィルムの代わりとなるイメージングプレート(IP)はフィルムと同程度の薄さです。しかもスキャンするだけで、現像処理の手間を省くことができます。撮影した画像のモニタ・調整・保存は、画像処理ソフトで簡単に行えます。

簡単に導入、しかもコンパクト!

高性能+高画質をコンパクトボディに凝縮
廃液処理が不要で環境にもやさしい

高画質と高性能をコンパクトなボディに凝縮。省スペースで設置場所を選びません。また、現像液、廃液の処理の必要がなく、臭いもありません。給排水設備や暗室なども不要です。

デジタル化によってさらに広がる可能性

使いやすさを追求した高機能性

デジタル化で広がる画像の有効活用

自動消去機能: IPはスキャン終了と同時に自動的に消去されるので、消去の手間を省き、消し忘れによる再撮影を防ぎます。

多様な保存形式: JPEG、bmpなど異なる形式に簡単に変換・保存することができます。




Dimaxis

デジタルX線画像処理ソフト

画像処理ソフトDimaxisで、高画質画像表示と自在なデータ管理を実現します。

- ◆ 各種X線画像はもちろん、口腔内カメラ等の画像も取り込み可能な、高機能画像処理ソフトです。
- ◆ CCDセンサやイメージングプレート(IP)によって得られたデジタルX線画像を同じデータベースで一元管理できます。たとえば、デンタルは「G スキャン 7400」で、パノラマ・セファロは「ProMax」を使うなどフレキシブルな組み合わせが可能です。
- ◆ 多様なファイルフォーマットで、画像をインポート/エクスポートできます。

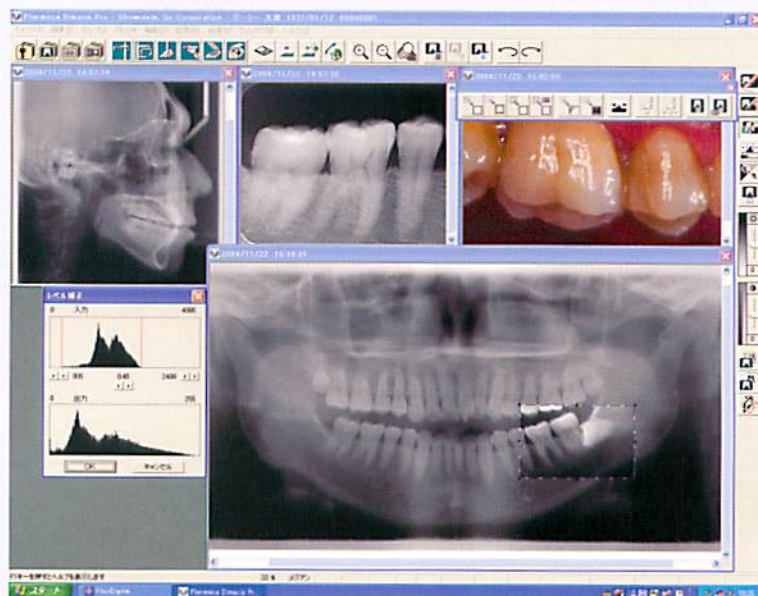

すべてのサイズに対応可能な イメージングプレート

デンタル(5種類)、パノラマ、セファロとも
簡単なプレート交換だけで対応可能です。



製品

■Gスキャン 7400 一式

- ・スキャナ本体
- ・UPS(無停電電源)
- ・絶縁トランス
- ・コンピュータ
- ・液晶モニタ

付属品

遮光パウチ

#0(小児)200枚、#2(標準)200枚

バリアエンベロップ

#0(小児)200枚、#2(標準)200枚

IPホルダー

#0-2

コダックMIN-Rスクリーンクリーナーワイプス

別売品

■コダック CR イメージングプレート

- ・コダック CR イメージングプレート
#0(小児)2枚、#1(24×40mm)2枚
#2(標準)2枚、#3(バイトウィング)2枚
#4(オクルーザル)2枚
PAN 15×30cm、CEPH 8"×10"

・遮光パウチ

#0(小児)200枚、#1(24×40mm)200枚
#2(標準)200枚、#3(バイトウィング)200枚
#4(オクルーザル)200枚

・バリアエンベロップ

#0(小児)200枚、#1(24×40mm)200枚
#2(標準)200枚、#3(バイトウィング)200枚
#4(オクルーザル)200枚

・IPホルダー

#0-2、#1-2、#2-3、#0-1-3-4

コダックMIN-Rスクリーンクリーナーワイプス

仕様

解像度	パノラマ/セファロ	高速:4.5 lp/mm未満 高解像度:6 lp/mm未満
	デンタル	高速:8 lp/mm未満 高解像度:10 lp/mm未満
スキャン時間 (スキャンするIPの 数によって異なります。)	パノラマ	74秒
	セファロ	95秒
	口腔内用 - 高解像度	67秒
	口腔内用 - 高速	40秒
IPデータの消去	自動 - 内蔵消去ランプを使用(手動消去も可能)	
使用するIPのタイプ	コダック CR イメージングプレート	
サイズ	W480mm × D380mm × H240mm	
重量	18kg	
電気定格	AC100V、50/60Hz、10A	

コダック CR イメージングプレート

サイズ	パノラマ	15cm×30cm
	セファロ	8"×10"
	デンタル	#0-21mm×31mm
		#1-24mm×40mm
	#2-31mm×41mm	
	#3-27mm×54mm	
	#4-57mm×76mm	

G スキャン 7400 管理医療機器 特定保守管理医療機器 219ADBZX00119A01
コダックCRイメージングプレート 一般医療機器 13B2X10060080000

●本カタログに記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。

※写真は印刷の都合上、実際の色とは異なって見えることがあります。
※製品の仕様および外観は、改良のためお断りなく変更することがあります。
※掲載の参考データは、2009年7月現在のものです。

ご使用に際しては、必ず製品添付の
説明書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** 製造販売元 **ケアストリームヘルス株式会社**
東京都板橋区蓮沼76-1 東京都中央区新川2-27-1

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
フリーダイヤル ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1266