

スピंकフルⅡ

簡単操作の印象材自動練和器、
コンパクトで高性能。

SPINKLEⅡ

練和をラクに、
簡単に。



かんたん操作

コンパクトボディ

手早く自動練和

『スピンドルII』はムラなくめらかに練和ができる、アルギン酸塩印象材自動練和器です。デジタル減算タイマーを搭載し、練和量や印象材の種類に合わせて秒数設定が可能。また、設定時間を自動的に記憶します。作動時の振動も少なく、バランスを崩した時には回転が停止するなど、安全機構を備えています。メンテナンス性にも優れたシンプルなデザインで、診療室にも美しくマッチします。

かんたん操作。

専用練和カップをホルダーに入れ、練和量に合わせてタイマーをセットし、スタートボタンを押すだけです。

<ご使用の手順>



専用練和カップに水、アルギン酸塩印象材の順に入れ、蓋をして数回振ってなじませます。

本体の蓋を開け、専用練和カップをホルダーにセットします。

練和量に合わせて1~3のタイマーを選択し、スタートボタンを押します。※2

練和終了のアラームが鳴ったら、専用練和カップを取り出し、印象採得を行います。(専用スパチュラ付)

練和時間をメモリーできる。

練和量や印象材の種類に合わせて、任意に1~99秒の練和時間を設定可能。また、設定した時間は自動的に記録されます。(3パターンメモリー機能付)

操作しやすく、清掃もラクなフラットタッチパネル



なめらかな練和を。

専用練和カップの自転と公転の複合練和で、ムラなくめらかに練和ができます。(写真は(株)ニッシン製 アルフレックスダストフリー ノーマルを使用)



豊富な付属品。

水用計量ボトル(目盛り付)※3やマグネット付ケース、専用スパチュラなど、使い易さを考えた付属品が盛りだくさん。

<付属品>

- 水用計量ボトル 1個
- 専用練和カップ(ブルー) 4個
- マグネット付ケース 1個
- 専用練和棒 1本
- 専用スパチュラ 1本



毎日使うものだから、安全に配慮。

- ・本体蓋を閉めないで作動しない、蓋検知センサー付き。
- ・回転時は本体蓋をしっかりとロック。
- ・モーターは本体蓋のロックを検知してから回転します。
- ・アンバランススイッチにより、バランス不良時には自動停止します。

- ※1 印象材により出来上がりの状態が異なります。必要に応じ付属の専用練和棒でなじませてください。
- ※2 印象材の硬化時間や、練和時間は、印象材の種類・カップ数・水温等条件によって異なります。使用前にテスト練和を行ってください。
- ※3 水用計量ボトルの計量スプーンのイラストは(株)ニッシン製アルフレックスの粉量に合わせています。(1目盛り20mL)

歯科用練成器具 スピンドルII

標準価格：229,000円 103410

仕様


- 電源：AC100V、50/60Hz
- 電源入力：50Hz/340VA 60Hz/390VA
- 練和容量：28~90g
- 練和時間：1~99秒(任意設定可能)
- 外形寸法：W245×H205×D290mm
- 質量：約18kg
- 安全機構：蓋検知センサー、アンバランス停止機構

別売品：専用練和カップ(フタ付・ブルー)

- | | | | |
|---------|----|--------|--------|
| 専用練和カップ | 1個 | 2,100円 | 103411 |
| 水用計量ボトル | 1本 | 1,500円 | 103412 |
| 専用スパチュラ | 1本 | 1,050円 | 103413 |

- 販売名 スピンドルII
- 一般的名称 歯科用練成器具
- 医療機器届出番号 11B2X00071000024
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

寸法図(単位:mm)

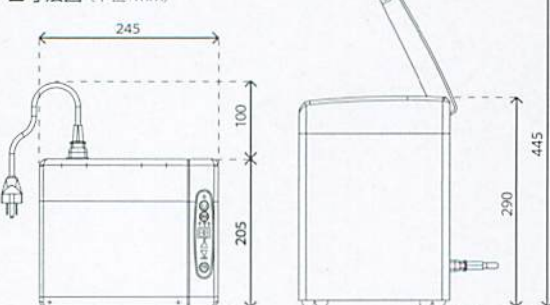

●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2011年1月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品に添付の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。

製造販売 株式会社モリタ東京製作所
埼玉県さいたま市中央区上落合2-1-24

発売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
www.dental-plaza.com