



INSTRUMENTS CATALOG Vol.4



SUNDENTAL CO.,LTD.

GRACEY CURETTE FIT PRO-FIT



少し太めの丸ハンドルは手にフィットし安定がよく、また軽量なため長時間の作業においても疲れを感じさせません。



● 規格はハンドルカラーで識別されています



G11-12とGF11-12
シャंक角度の違い



GRACEY CURETTE SCALER PRO-FIT

たわみのない太いシャンク (PRO-FITはハードタイプ)

プロフィット ハード 各 ¥3,800 (税別)



PRO-FIT ハードの特長	ハードタイプ(標準)	規格
多量で強固に付着した歯石を除去する時に使用します。 グロススケージングに最適です。		

プロフィット ディープハード 各 ¥3,800 (税別)



PRO-FIT ディープハードの特長	ハードタイプとの比較	規格
深いポケットのSRPに使用します。 たわみがなく、しっかりSRPしたい時に最適です。		

プロフィット ミニハード 各 ¥3,800 (税別)



PRO-FIT ミニハードの特長	ハードタイプとの比較	規格
狭いポケットのSRPに使用します。 分岐部や前歯舌側などに最適です。		



シンプルな変則8角ハンドルは、細すぎず太すぎず手に程よく馴染み
また軽量なため、微細な感触が手指へ伝わります。



G11-12とGF11-12
シャंक角度の違い



G13-14とGF13-14
シャंक角度の違い

● 規格はハンドルカラーで識別されています

G1-2	G3-4	G5-6	G7-8	G9-10	G11-12	G13-14	GF11-12	GF13-14
前歯部の歯面	前歯部の歯面	前歯部と小臼歯部の歯面	臼歯部の頬舌面	臼歯部の頬舌面 分岐部	臼歯部の近心面 近心隣接面	臼歯部の遠心面 遠心隣接面	G11-12に角度をつけ 操作性を向上	G13-14に角度をつけ 操作性を向上

GRACEY CURETTE SCALER PRO-8

柔軟性のある細いシャンク (PRO-8はソフトタイプ)

プロエイト ソフト 各 ¥3,800 (税別)



PRO-8 ソフトの特長	ソフトタイプ(標準)	規格																				
細いシャンクは歯石を触知しやすく 微細な歯石を除去する時に最適です。	 標準	<table border="0"> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO G1-2</td> <td>G 1-2</td> <td> CURETTE SCALER PRO G11-12</td> <td>G 11-12</td> </tr> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO G3-4</td> <td>G 3-4</td> <td> CURETTE SCALER PRO G13-14</td> <td>G 13-14</td> </tr> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO G5-6</td> <td>G5-6</td> <td> CURETTE SCALER PRO GF11-12</td> <td>GF11-12</td> </tr> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO G7-8</td> <td>G7-8</td> <td> CURETTE SCALER PRO GF13-14</td> <td>GF13-14</td> </tr> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO G9-10</td> <td>G9-10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	CURETTE SCALER PRO G1-2	G 1-2	CURETTE SCALER PRO G11-12	G 11-12	CURETTE SCALER PRO G3-4	G 3-4	CURETTE SCALER PRO G13-14	G 13-14	CURETTE SCALER PRO G5-6	G5-6	CURETTE SCALER PRO GF11-12	GF11-12	CURETTE SCALER PRO G7-8	G7-8	CURETTE SCALER PRO GF13-14	GF13-14	CURETTE SCALER PRO G9-10	G9-10		
CURETTE SCALER PRO G1-2	G 1-2	CURETTE SCALER PRO G11-12	G 11-12																			
CURETTE SCALER PRO G3-4	G 3-4	CURETTE SCALER PRO G13-14	G 13-14																			
CURETTE SCALER PRO G5-6	G5-6	CURETTE SCALER PRO GF11-12	GF11-12																			
CURETTE SCALER PRO G7-8	G7-8	CURETTE SCALER PRO GF13-14	GF13-14																			
CURETTE SCALER PRO G9-10	G9-10																					
		○ ソフトはリングカラー (白)																				

プロエイト ディープソフト 各 ¥3,800 (税別)



PRO-8 ディープソフトの特長	ソフトタイプとの比較	規格										
深いポケット内の取り残しを SRP する際に使用します。繊細な動きが 求められる仕上げ用に最適です。	 ソフト ディープソフト 長い	<table border="0"> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO G5-6</td> <td>G 5-6</td> </tr> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO G7-8</td> <td>G 7-8</td> </tr> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO G11-12</td> <td>G11-12</td> </tr> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO G13-14</td> <td>G13-14</td> </tr> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO GF11-12</td> <td>GF11-12</td> </tr> </table>	CURETTE SCALER PRO G5-6	G 5-6	CURETTE SCALER PRO G7-8	G 7-8	CURETTE SCALER PRO G11-12	G11-12	CURETTE SCALER PRO G13-14	G13-14	CURETTE SCALER PRO GF11-12	GF11-12
CURETTE SCALER PRO G5-6	G 5-6											
CURETTE SCALER PRO G7-8	G 7-8											
CURETTE SCALER PRO G11-12	G11-12											
CURETTE SCALER PRO G13-14	G13-14											
CURETTE SCALER PRO GF11-12	GF11-12											
		● ディープソフトはリングカラー (黄)										

プロエイト ミニソフト 各 ¥3,800 (税別)



PRO-8 ミニソフトの特長	ソフトタイプとの比較	規格										
狭いポケットの SRP に使用します。 歯周組織へのダメージを最小限に考 えた小さなブレードは、再 SRP 時 に最適です。	 ソフト ミニソフト 長い	<table border="0"> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO G5-6</td> <td>G 5-6</td> </tr> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO G7-8</td> <td>G 7-8</td> </tr> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO G11-12</td> <td>G11-12</td> </tr> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO G13-14</td> <td>G13-14</td> </tr> <tr> <td> CURETTE SCALER PRO GF11-12</td> <td>GF11-12</td> </tr> </table>	CURETTE SCALER PRO G5-6	G 5-6	CURETTE SCALER PRO G7-8	G 7-8	CURETTE SCALER PRO G11-12	G11-12	CURETTE SCALER PRO G13-14	G13-14	CURETTE SCALER PRO GF11-12	GF11-12
CURETTE SCALER PRO G5-6	G 5-6											
CURETTE SCALER PRO G7-8	G 7-8											
CURETTE SCALER PRO G11-12	G11-12											
CURETTE SCALER PRO G13-14	G13-14											
CURETTE SCALER PRO GF11-12	GF11-12											
		● ミニソフトはリングカラー (青)										

GRACEY CURETTE SCALER **PRO-FIT** *almighty*


安定感があり手にフィットする丸ハンドル
 シャンクはたわみのないハードタイプで、ブレードはレギュラーとミニの中間サイズになっています。

プロフィット オールマイティ 各 ¥3,800 (税別)



PRO-FIT オールマイティの特長	オールマイティ(標準)	規格
初期治療からメンテナンスまで、 応用範囲が広くあらゆる症例に 使用できます。	<p>オールマイティ</p> <p>ブレード % はレギュラーを1としての比較</p>	<p>G 5-6</p> <p>G 7-8</p> <p>G11-12</p> <p>G13-14</p> <p>GF11-12</p>

プロフィット オールマイティロング 各 ¥3,800 (税別)

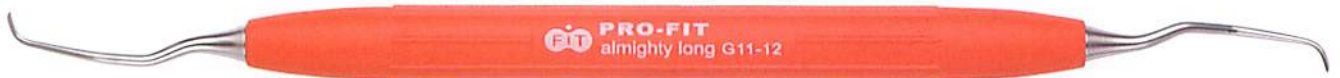

PRO-FIT オールマイティロングの特長	オールマイティとの比較	規格
深いポケットや臼歯部にはシャンクの 長いオールマイティロングが適して います。	<p>オールマイティ</p> <p>オールマイティロング</p> <p>長い</p>	<p>G 5-6</p> <p>G 7-8</p> <p>G11-12</p> <p>G13-14</p> <p>GF11-12</p>

● 規格はハンドルカラーで識別されています






GRACEY CURETTE SCALER **PRO-8** *almighty*

シンプルでスリムな8角ハンドル


シャンクはたわみのないハードタイプで、ブレードはレギュラーとミニの中間サイズになっています。

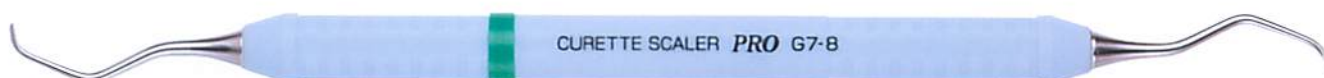

プロエイト オールマイティ 各 ¥3,800 (税別)




PRO-8 オールマイティの特長	オールマイティ(標準)	規格
初期治療からメンテナンスまで、 応用範囲が広くあらゆる症例に 使用できます。	 <p>ブレード $\frac{2}{3}$ はレギュラーを1としての比較</p>	

プロエイト オールマイティロング 各 ¥3,800 (税別)

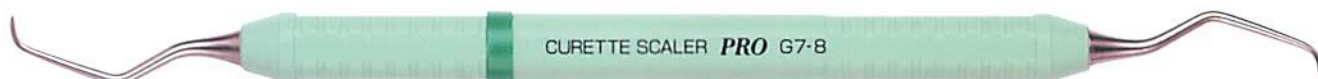

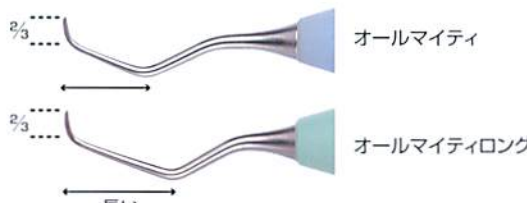PRO-8 オールマイティロングの特長	オールマイティとの比較	規格
深いポケットや臼歯部にはシャンクの 長いオールマイティロングが適して います。		

● 規格はリングカラーで識別されています

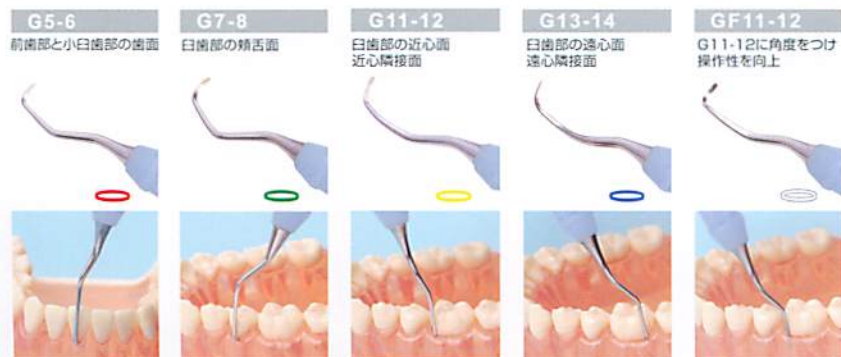

G11-12とGF11-12
 シャンク角度の違い



Sickle Scaler

臨床現場からの提案で誕生。


刃部が薄く、隣接への挿入がスムーズになりました。1本のスケーラーで全歯面に対応することができます。

シッケルスケーラー DH.PRO ¥3,800 (税別)



ネックの傾斜

固定指を離すことができ、視野が広がります
挿入時、歯面とエッジの角度が小さくなり
軟組織を傷つけません

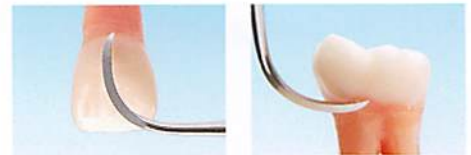

ゆるやかな曲線

水平的ストロークが安定します
隣接面への挿入をスムーズにします

File Scaler ハッシュフェルトタイプ

刃部が薄く、狭くてキュレットが入らない部位に使用します。使用の際は不用意に削りすぎないように注意が必要です。

ファイルスケーラー SDH-1 ¥4,800 (税別)



ファイルスケーラー SDH-2 ¥4,800 (税別)



SDH-1 使用



歯石にしっかりファイルにアクセスさせ、プルストロークで除去します

Universal Curette Scaler

操作の基本を習得し、臨床で習熟すれば、この1本ですべての歯面のスケーリングができます。

日本人はどのような料理もお箸一膳で上手に食事をします。そのような動作経済(エルゴノミクス)の考えから両頭刃のスケーラー1本で操作の連続性や多様性を追求した結果、生まれたのがMK UCS スケーラーです。

MK ユニバーサル キュレットスケーラー ラバー (MK UCS-R) ¥4,000 (税別)



考案者
加藤元彦 (東京都港区 開業)

テクニカルポイント

1. 片方の刃で連続して搔爬とスケーリングを同時に行う。
2. 基本的操作を確実に習得する。(回転→引き上げ→引き回し)
3. 親指・人差し指・中指の3本で執筆状に持ち、薬指を固定指とする。
4. 固定指の位置を習得する。
5. スタートは必ず遠心から行い、正中方向へ操作する。



① 隣接(回転)
ハンドルをクルクル回転させながら引っかけはじき取る



② 隅角(引き上げ)
刃を歯冠方向に引き上げる



③ 頬舌(引き回し)
刃の向きを変えて遠心から近心へ水平に引く

Excavator

M.I (Minimum Intervention)

「最小限の侵襲」により最大限の効果を得るという概念に基づき治療することが求められています。

- 240°に刃がついているため、回転や引く操作でも切れます。
- できる限り歯質を残すために、最小限の軟化象牙質除去を可能にします。
- タービン・エンジンの振動や音で患者さんに、不快感を与えないやさしい治療ができます。



ストレート
窩壁や窩底などの平面に最適




カーブ
アンダーカット部分や隣接面に最適

エクスケーター ラウンドタイプ ストレート 各 ¥4,000 (税別)



エクスケーター ラウンドタイプ カーブ 各 ¥4,000 (税別)

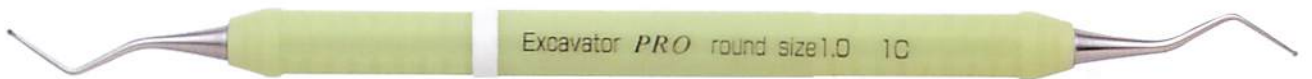

Periodontal Probes

PPD、BOP、歯肉の形態確認など診査に使用します。黒い目盛りでカラーコードされ見やすくなっています。カラーコードはオートクレープやEOガス滅菌に対応、通常の使用では剥がれたり薄くなったりしません。

- S-2は臼歯部への到達性が高く、ポケットを正確に測定できます。



ペリオプローブ S-1
¥2,800 (税別)

ペリオプローブ S-2
¥3,000 (税別)

ペリオプローブ S-3
¥2,800 (税別)

ペリオプローブ S-4
¥2,800 (税別)

ペリオプローブ D-1 価格 ¥4,300 (税別)



- 分岐部病変の診査に使用、骨欠損の程度を確認します。

Explorers

¥2,000 (税別)

縁下歯石の探知や歯根面の触知に使用します。シャンクは細く、ポケット内の状態が手指に伝わりやすくなっています。

エキスプローラー #11-12



ポケット探針



前歯はハンドルを歯軸へ合わせて操作します



臼歯は第1シャンクを歯軸へ合わせて操作します

NK Packers

各 ¥4,000 (税別)

患者さんに苦痛を与えることなく、より容易に歯肉圧排操作が出来るように考案されたインストルメントです。圧排器頭部の厚みを薄く小さくし、圧排糸を回転挿入しやすくしました。

NK パッカー #1



ユニバーサルタイプ

NK パッカー #2



前歯・小臼歯用

NK パッカー #3



大臼歯用

SD Gum Protector

2本セット/組合せは自由 ¥3,800 (税別)

より正確に、より美しく形成するために考案されたインストルメントです。歯肉を保護し直視下で形成ができます。

SD ガムプロテクター #1



SD ガムプロテクター #2



Spreaders (根管充填器) 各 ¥2,800 (税別)

側方加圧充填に用います。根管壁にガッタパーチャポイントを押しつけ間隙を作り、更にポイントを追加して根管充填していきます。

スプレッター #0.25 S



スプレッター #0.25 L



Pluggers (根管充填器) 各 ¥1,200 (税別)

垂直加圧充填に用います。根管充填用ポイントを上から押し込むように使用します。

ブラガー#1



ブラガー#2



ブラガー#3



Heat Cutter


先端部が倒円錐型でガッタパーチャポイントのカットがしやすく、先端部を熱しても手元が熱くならず使用できます。

ヒートカッター P&S は側方加圧充填・垂直加圧充填にも使用できます。

ヒートカッター P ¥3,000 (税別)



ヒートカッター P&S ¥4,000 (税別)

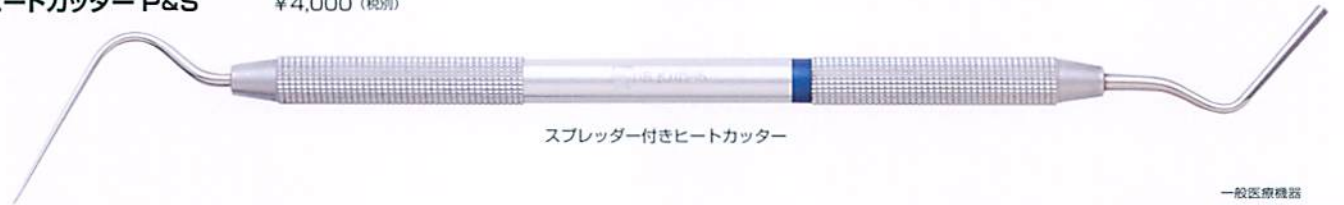

スプレッター付きヒートカッター

一般医療機器
許可番号 08B3X00018



SD マーカーリング L

インストルメントの識別や整理に便利なカラーリング。オートクレープ滅菌が可能です。

80個入 (8色x10個) ¥2,400(税別)
20個入 (単色x20個) ¥700(税別)



SD マーカーリング S

インストルメントの識別や整理に便利なカラーリング。オートクレープ滅菌が可能です。

120個入 (8色x15個) ¥2,400(税別)
20個入 (単色x20個) ¥500(税別)



MAX ガッタパーチャポイント (メイン)

厳選した天然ガッタパーチャを原料とし、最適な硬の強さと耐久性を備え、湾曲根管へもスムーズに挿入できます。

No.25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140
120本入 (No.25-80) ¥2,500(税別)
60本入 (No.90-140) ¥2,500(税別)

管理医療機器
許可番号 27B2X00041 (JIS T 6507)



MAX ガッタパーチャポイント (アクセサリー)

最適な弾力性と柔軟性を持ち、形状もより一層クサビ状になり挿入もスムーズにおこなえます。

細小 細中 細大 小 中 大 太小 太中 太大
150本入 ¥2,200(税別)

管理医療機器
許可番号 27B2X00041 (JIS T 6507)

このカタログは 2008年5月現在のものです。

- 製品の外觀、仕様、価格などは変更することがあります。
- 製品の色は印刷の関係上、多少異なることがあります。
- 表示価格に消費税は含まれていません。

<http://www.sundental.jp>

SD サンデンタル株式会社

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号 Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690

東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目12番1号 Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号 Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339