

For better dentistry

DENTSPLY



歯科用充填・修復材補助器具

V3 システム

操作性と確実性を両立したユニークな形態

V3RING

グラスファイバー強化型
プラスチック製タイン


繰り返しの高圧蒸気滅菌にも強く、
長期間使用できます。

歯牙の解剖学的形態に
フィットする形状

臼歯頬舌面の解剖学的形態にフィットし、
マトリックスを安定的に把持します。

純ニッケルチタン製のリング

適度な力で歯間離開ができ長期間、
把持力が低下することはありません。

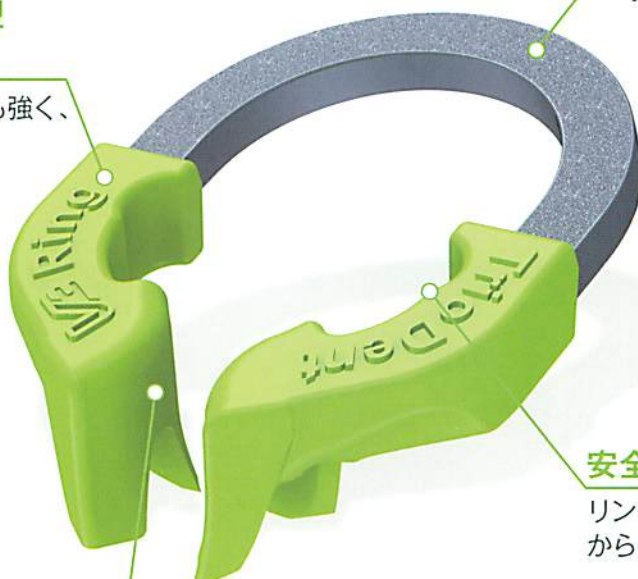

小さい歯牙に使用しやすいナロータイプ

安全性を考慮した把持部

リングの内側の把持部がフォーセプス
からの脱離を防止します。



V3MATRIX



 **triodent**
SIMPLE SOLUTIONS FOR SMART DENTISTS



デンツプライ三金株式会社

<http://www.dentsply-sankin.com>

使用手順 (Dr Andreas Hugenberg)



1. 通法に従って高洞形成



2. ピンツィーザーでタブマトリックスを把持し、セット後ウェーブウェッジを挿入



3. フォーセプスでV3リングを把持し、セット



4. タブマトリックスと、ウェーブウェッジをV3リングで固定



5. CRを充填



6. CRを重合させた後、V3リング、ウェーブウェッジ、タブマトリックスを撤去



7. 形態修正、および研磨



8. 研磨後

商品番号	商品名	内容	価格
N19333020000	V3リング スターターパック	V3リングユニバーサル×1個、V3リングナロー×1個、フォーセプス×1本、ピンツィーザー×2本、ウェーブウェッジ×75個、V3マトリックス×75個	49,800
N19333700000	V3トライアルキット	V3リングユニバーサル×1個、ピンツィーザー×1本、ウェーブウェッジ×30個、V3マトリックス×30個	19,800
N19333170000	V300 マルチパック	ウェーブウェッジ、ピンク、パープル、ホワイト、各50個 V3マトリックス 4.5mm、5.5mm、6.5mm 各50個	21,000

商品番号	商品名	内容	価格
N19333410000	V3リングミックス 2個	V3リングユニバーサル 1個、V3リングナロー 1個	19,600
N19333420000	V3リングユニバーサル 2個	V3リングユニバーサル ×2個	19,600
N19333430000	V3リングナロー 2個	V3リングナロー ×2個	19,600
N19333720000	V3マトリックス 4.5mm 50	V3マトリックス 4.5mm×50個	5,000
N19333730000	V3マトリックス 5.5mm 50	V3マトリックス 5.5mm×50個	5,000
N19333740000	V3マトリックス 6.5mm 50	V3マトリックス 6.5mm×50個	5,000
N19333750000	V3マトリックス 4.5mm 100	V3マトリックス 4.5mm×100個	9,000
N19333760000	V3マトリックス 5.5mm 100	V3マトリックス 5.5mm×100個	9,000
N19333770000	V3マトリックス 6.5mm 100	V3マトリックス 6.5mm×100個	9,000
N193u2064S00	ウェーブウェッジ (S) ホワイト100	ウェーブウェッジ (S) ホワイト	5,500
N193u2064M00	ウェーブウェッジ (M) ピンク100	ウェーブウェッジ (M) ピンク	5,500
N193u2064L00	ウェーブウェッジ (L) パープル100	ウェーブウェッジ (L) パープル	5,500
N193u2062000	ダブルウェッジ 64	ダブルウェッジ	3,180

商品番号	商品名	内容	価格
N193u2075000	ピンツィーザー	ピンツィーザー 1本	7,000
N19320753000	ピンツィーザー3本入	ピンツィーザー3本入	14,000
N193u2061000	フォーセプス	フォーセプス1本	7,000
N19320613000	フォーセプス3本入	フォーセプス3本入	14,000



ウェーブウェッジ
白：スモール
赤：ミディアム
紫：ラージ



ピンツィーザー



フォーセプス



V3リング スターターパック



V3リング



4.5



5.5



6.5

V3マトリックス

医療機器届出番号：09B1X00005Y02120

表示価格は、2010年4月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。*仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造
販売元

デンツプライ三金株式会社

那須工場 / 〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1382 番 11

東京本社 〒106-0041 東京都港区麻布台 1-8-10

札幌 / TEL:011-222-4101 FAX:011-222-2344 名古屋 / TEL:052-452-2151 FAX:052-452-2155
仙台 / TEL:022-373-5700 FAX:022-373-5133 大阪 / TEL:06-6386-9350 FAX:06-6386-9374
東京 / TEL:03-5114-1002 FAX:03-5114-1036 福岡 / TEL:092-411-6326 FAX:092-472-3880
関東 / TEL:03-5114-1003 FAX:03-5114-1036 長野 / TEL:03-5114-1025 FAX:03-5114-1041

カスタマー・サービス・センター
受付時間：9:00-17:00 (土・日・祝祭日を除く)



0120-789-123 FAX:0120-789-129

<http://www.dentsply-sankin.com>