



SEKIMURA

しつかり除菌
除菌力は塩素よりも強く、耐性菌を作りません。

すっきり洗浄
剥離作用により頑固なヌメリを取り除きます。

さわやか脱臭
腐敗臭や薬品臭等の不快な臭いを取り除きます。



もっと便利に、もっとやさしく...
時代が求める水と酸素のテクノロジー「オゾン水」
優れた除菌力で安全・手軽に衛生管理が行えます。

オゾン水生成器

ピュアトロン O_3

排オゾンガス・除湿・窒素化合物への3つの安全対策を完備

オゾン水の原料は酸素と水だけ。食塩等の添加物は一切不要です。使用後は分解して元の水と酸素に戻るため残留性もなく、環境汚染の心配もありません。

除菌力は塩素の約7倍もあると言われ、耐性菌を作らず、手荒れの心配もありません。また、蛇口を開くだけで瞬時に生成され、低ランニングコストで使用でき経済的です。

新型ピュアトロン O_3 AUTO
398,000円 (オートセンサー付)



新型ピュアトロン O_3
360,000円



切替式シャワーヘッド
ストレート&シャワー

人と環境にやさしいオゾン水が、いつでも、簡単につくれます。

オゾン水生成器

ピュアトロン O₃




■オゾン水とは？

オゾン(O₃)は、酸素(O₂)に酸素原子(O)が結合した無色の気体で、大気中に存在し、酸素原子を放出して酸素に戻ろうとする性質があります。放出された酸素原子は、その酸化力により細菌の細胞膜を酸化して破壊し、菌を死滅させます。

オゾン水は、このオゾン溶存水で、水に溶けたオゾンはガス状のオゾンより反応速度が速いため、除菌・脱臭・洗浄に優れた効果を発揮します。また、使用後は分解して元の水と酸素に戻るため、残留性もなく、環境汚染の心配もありません。

■オゾンによる除菌の原理

オゾンが分解時に発生する酸素原子の強力な酸化力で細菌の細胞壁を破壊します。そして細胞壁を失った細菌は、細胞内の成分が外に漏れ出る溶菌作用を起こし、瞬時に死滅します。

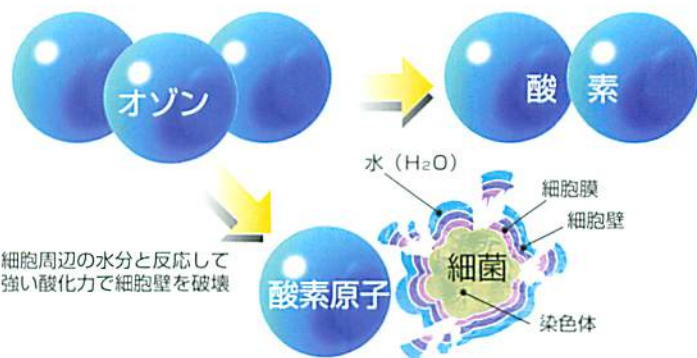

■オゾンによる脱臭の原理

オゾンが分解時に発生する酸素原子が臭いの成分と結合し、臭いの元を酸化分解することにより脱臭します。

■特長

●安全な水質を確保

排オゾンガスの発生を抑える触媒分解器や、除湿効果に優れた空気処理剤、窒素化合物の発生を抑える水冷式発生体等の安全対策により、いつでも安心してオゾン水をご利用いただけます。

●簡単操作

蛇口を開くだけで瞬時にオゾン水が得られます。また、オートセンサー付では、センサー部に手をかざすだけで吐水します。(吐水時間は標準約20秒/10~60秒の範囲で調節可能)

●切替式シャワーヘッドを標準装備


「ストレート&シャワー」2通りの吐水方式がワンタッチで切り替えられます。

●低ランニングコスト

わずかな電気代と消耗品代(空気乾燥剤・分解剤)でご使用いただけます。

■仕様

外形寸法: W300×D150×H300mm
 重量: 約8kg/約8.5kg*
 定格電圧: AC100V 50/60Hz
 消費電力: 33W/39W*
 吐出量: 約5L/min
 オゾン濃度: 約0.6~0.8mg/L
 給水圧: 水道水 4~1kgf/cm²
 空気乾燥剤使用限界: 約12ヶ月(1日1時間使用した場合)
 分解剤使用限界: 約24ヶ月(1日1時間使用した場合)
 注) *はピュアトロンO₃ AUTOの場合

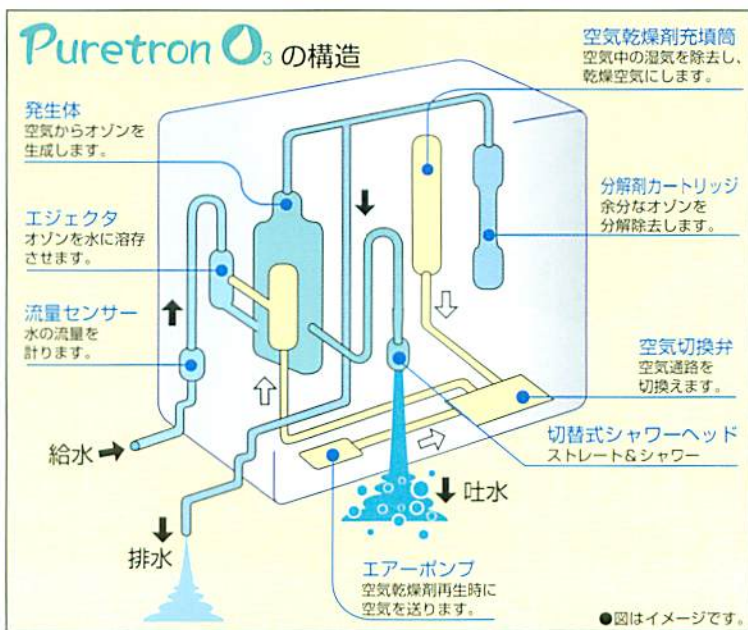

- 【別売消耗品】 ●空気乾燥剤……………4,000円
 ●分解剤カートリッジ……………8,000円
 ※記載の価格は2009年3月1日現在のもので、消費税は含まれません。

取扱店

株式会社 滝沢歯科器械店
 〒386-0014 上田市材木町1-20-4
 ☎0268-27-3351 FAX0268-27-9307
 E-mail tdcueda@ruby.ocn.ne.jp
 http://takizawa-dentalnet.com/



本社/〒174-0056 東京都板橋区志村1-28-1 ☎03(3966)7736
 営業所/大阪☎06(6308)1173 福岡☎092(432)0770 札幌☎011(622)7532
 E-mail:sedent@sedent.co.jp URL http://www.sedent.co.jp